


NycoCard[®] :: **READER II**

Standardní operační postup – obsluha přístroje

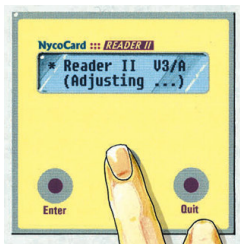


Zapnutí přístroje tlačítkem **ON/Select**
Na displeji se objeví Adjusting

Vyčkejte na zvukový signál.
Na displeji se objeví Main menu/Calibrate




Potvrďte provedení kalibrace
tlačítkem **ENTER**.

Na displeji se zobrazí pokyn k přiložení čtecí
tužky „Place Pen“.

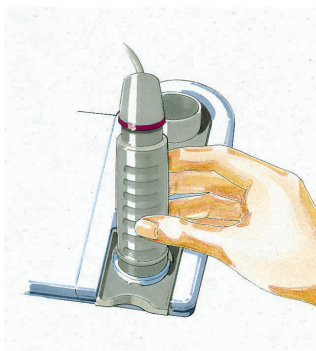

Otevřete víčko kalibračního zařízení,
přiložte čtecí tužku na bílou kazetu.
Vyčkejte zaznění zvukového signálu.

Uložte čtecí tužku do držáku přístroje.

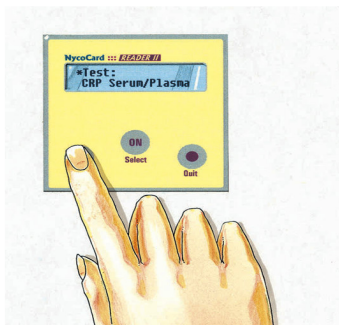

Na displeji se zobrazí „Main Meny/ Enter
Test“

Potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Na displeji se zobrazí zvolený test (v paměti
přístroje je uložen poslední prováděný test)


*Upozornění: vzorek krve – CRP Whole Blood
kontrola – CRP Serum/Plasma*

Potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Na displeji se zobrazí pokyn k přiložení čtecí
tužky „Place Pen“



Vyhodnocení je provedeno přiložením čtecí
tužky na testovací kazetu nebo kartu.
Čtecí tužku je nutné držet na kazetě nebo
kartě do konce měření.

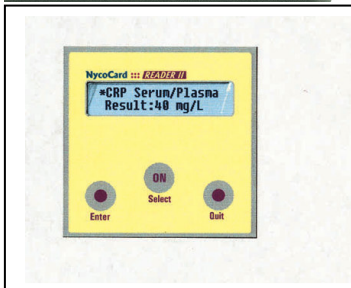

Výsledek – Result je zobrazen na
displeji v jednotkách odpovídajících
zvolenému testu.

Vypnutí přístroje tlačítkem **Quit** a
potvrdit tlačítkem **ENTER**.