



NOW[®] Flu A / B

Provedení testu

Úplná verze provedení a hodnocení všech testů je obsažena v návodu

1. KROK – PŘÍPRAVA VZORKU

Nasální výplach:



Nasální výplach nepotřebuje přípravný krok, pokračujte krokem č. 2.

Výtěr z nosohltanu:

Vymyjte tampon v 0,5-3 mL transportního systému jemným kroužením tamponu ve vialce, přitiskněte tampon k její stěně a otřete ho o ni otáčením. Pokračujte krokem č. 2.



Kontrolní tampony:

1. Ve víčku ampule je drobná jehla. Víčko nešroubujte, ale stlačte proti ampuli. Jehla slyšitelně probodne její horní část. Odstraňte víčko a **celý obsah** vylijte do vialky.
2. Namočte tampon do roztoku ve vialce a několikrát s ním otočte.
3. Přitiskněte tampon ke stěně vialky a otřete ho o ni otáčením. Vytlačíte tím vzorek do roztoku.
4. Tampon vyhod'te.
5. Co nejdříve pokračujte krokem č. 2.

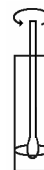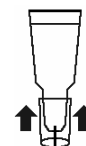

2. KROK – PROVEDENÍ TESTU

1. Ochrannou folii odstraňte těsně před testováním. kazetu položte na stůl vodorovně.
2. Stlačte silně horní část pipetky, ponořte ji do vialky a uvolněním roztok nasajte. Ujistěte se, že v dolní části pipetky není žádná vzduchová bublina.
3. Celý obsah pipetky pomalu naneste na horní část testovacího proužku, tak aby se celý obsah (100 µL) vsáknul.
4. Odstraňte adhezivní pásku na pravé straně testovací kazety a zavřete kazetu. Výsledek přečtěte po 15 min. Výsledky odečtené dříve mohou být nepřesné!

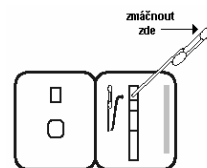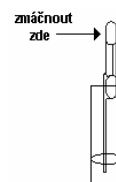

3. KROK – VYHODNOCENÍ TESTU



Flu A pozitivní



Flu B pozitivní



Flu A & Flu B
negativní(-)



Chybný test