


Provedení testu

Úplná verze a provedení testu a **kontrolního stanovení** je obsažena v příbalovém listu

Před zahájením práce musí být všechny složky soupravy vytemperovány na pokojovou teplotu.

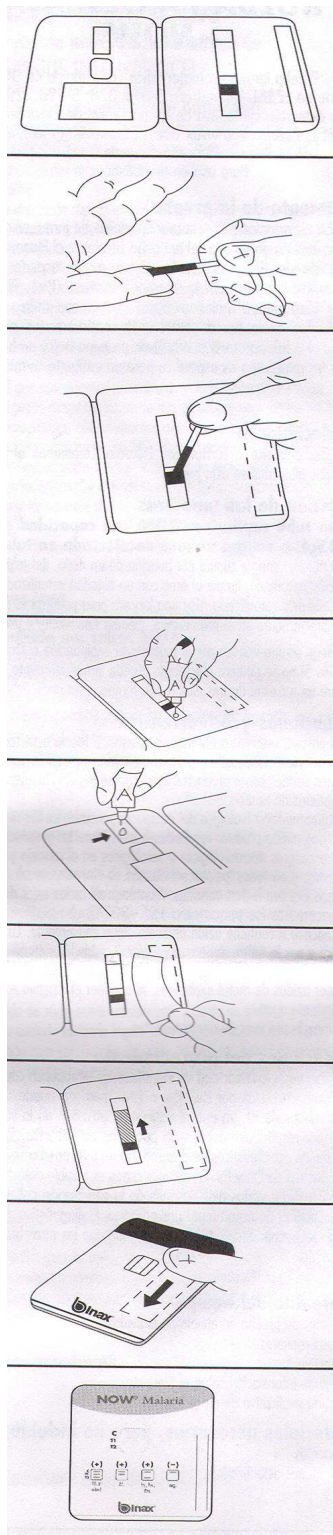

Otevřete testovací kazetu těsně před nanášením vzorku a nechte ve vodorovné poloze

Kapilára musí být zcela naplněná.

Přiložte kapiláru spodním koncem na purpurové políčko nanášecí oblasti testovacího proužku. Vzorek krve se nanese pouhým přiložením kapiláry ve svislé poloze na nanášecí oblast a jemným opakovaným přitlačením na několik míst políčka. Není nutné aplikovat celý objem krve z kapiláry. Jakmile je purpurové políčko nasáklé, vyhoďte kapiláru.

Na bílé políčko pod purpurovým políčkem přidejte **2 kapky reagentie A** - lahvičku je třeba držet ve svislé poloze.

Do políčka na levé straně otevřené kazety kápněte **4 kapky reagentie A**

Odstraňte pásku z adhezivního proužku na pravé straně kazety. Ujistěte se, že adhezivní proužek je odkryt.

Ponechte nasáknout vzorek po celé délce testovacího stripu. **Vyčkejte, až se vzorek krve prosákne na počátek bílého absorpčního políčka na vrcholu stripu.**


Okamžitě uzavřete kazetu. Důkladně k sobě přitiskněte okraje psaníčka v oblasti adhezivního proužku. Začněte měřit čas !!!

Po 10 minutách odečtěte výsledky v okénku testovací kazety. Silně pozitivní vzorky lze odečíst dříve.

**Neplatný
výsledek:**

Test je neplatný
neobjeví-li se
zbarvený
proužek
v blízkosti zóny
C.

V tomto případě
musí být test
zopakován
za použití nové
kazety

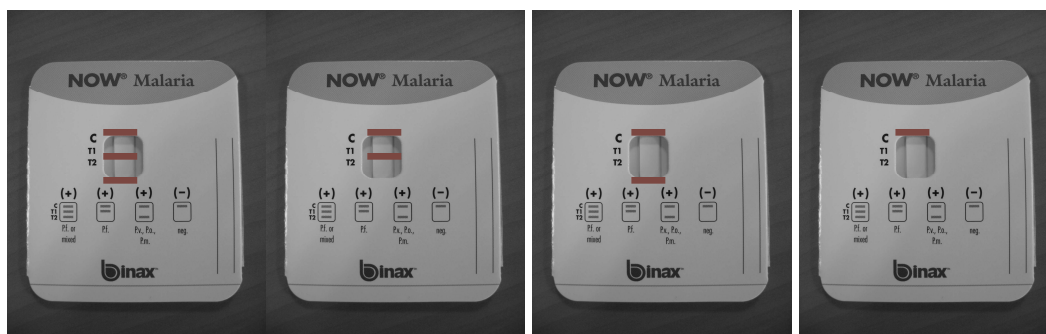

**P.f., P.v., P.o., P.m.
pozitivní (+)
zóna T1, T2 a C**

**P.f.
pozitivní (+)
zóna T1 a C**

**P.v., P.o., P.m.
pozitivní (+)
zóna T2 a C**

**negativní
(-)
pouze zóna C**

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ**Infekce PF nebo smíšená infekce (PF, PV, PO, PM):**

Zbarvené proužky v zóně T1, T2 a C znamenají pozitivní výsledek.

Infekce PF:

Zbarvené proužky v blízkosti zón T1 a C znamenají pozitivní výsledek.

Infekce PV, PO, PM nebo smíšená infekce těchto tří druhů (PV, PO, PM):

Zbarvené proužky v blízkosti zón T2 a C znamenají pozitivní výsledek.

Negativní výsledek:

Test je negativní objeví-li se zbarvený proužek pouze v blízkosti zóny C.

Neplatný výsledek:

Test je neplatný neobjeví-li se zbarvený proužek v blízkosti zóny C. V tomto případě musí být test zopakován za použití nové kazety.