




NOW[®] *Streptococcus pyogenes group A*

Provedení testu


Úplná verze a provedení testu a **kontrolního stanovení** je obsažena v příbalovém listu

PRACOVNÍ POSTUP

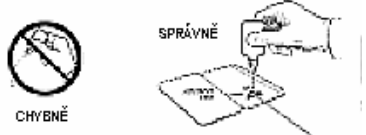
1. Otevřete testovací kazetu těsně před použitím, položte na rovnou plochu a postupujte dle následujícího návodu:
2. Vložte vzorek od pacienta či kontrolní tampón do zeleného trojúhelníku (▲) a silně vtlačte tampón směrem vzhůru, až se objeví špička tampónu v otvoru nad trojúhelníkem. 
3. Kápněte **ČINIDLO 1** ve vertikální poloze, zhruba 3 centimetry nad jamkou postupně **4 KAPKY** do otvoru v trojúhelníku ▲.
4. Poté stejným způsobem kápněte **4 KAPKY ČINIDLA 2**. 
5. Poznámka: Nesprávná aplikace činidel může způsobit falešné výsledky testu. 
6. Otočte třikrát tampónem **VE SMĚRU** hodinových ručiček. Tampón nevyjímejte.
7. Vyčkejte 1 minutu.
8. Sloupněte folii z adhezivního proužku na pravém okraji testovací kazety. Zavřete opatrně obě poloviny kazety. Vyčkejte 5 minut a odečtěte ihned výsledek ve výsledkovém okně. Výsledky odečtené před i po uvedeném čase mohou být nepřesné. 

Poznámka: Pro lepší pohodlí, lze odlomit přesahující rukojeť tampónu. Přitom je nutné dát pozor na to, aby se tampón neposunul z jamky.


INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

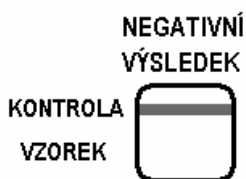

Negativní výsledek u negativních vzorků dojde k zabarvení kontrolní linie (Control line) v horní části výsledkového okna do růžova až purpurova. Tento výsledek značí správně provedený test a nepřítomnost Strep A antigenu.

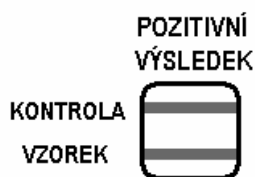

Pozitivní výsledek Pozitivní vzorky způsobí objevení dvou růžových až purpurových linií. To značí, že byl detekován antigen Strep A. U vzorků obsahujících menší množství antigenu mohou být testovací linie (Sample line) slaběji zabarveny.

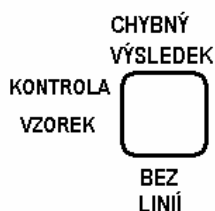

Chybný výsledek - pokud se neobjeví žádná linie nebo se objeví jen linie v dolní části okénka je test chybný a měl by být opakován.