





NOW[®] *Streptococcus pneumoniae*

Provedení testu

Úplná verze a provedení testu a **kontrolního stanovení** je obsažena v příbalovém listu

1. Vytemperujte vzorek pacienta/kontrolní tampon na laboratorní teplotu (15-30 °C) a těsně před použitím odstraňte ochrannou folii. Kazetu položte na stůl vodorovně.
2. Ponořte Binax tampon do testovaného vzorku moče. Než tampon vyjmete, dotkněte se jím stěny nádoby aby jste odstranili přebytečnou moč.
3. Zasuňte tampon do spodní jamky tak, aby byl celý vidět v horní jamce.
4. Z kapací lahvičky z výšky asi 1-2 cm kápněte **3** kapky Reagentu A do spodní jamky.

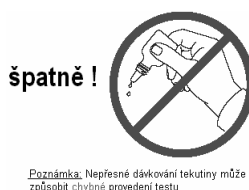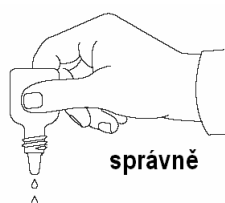

5. Odstraňte adhezivní pásku na pravé straně testovací kazety a zavřete ji. Výsledek vyhodnoťte za 15 min. Některé pozitivní vzorky mohou být čitelné dříve než v 15 minutách.



Výsledek přečtěte v okénku

Poznámka: Je nutné, aby tampon po celých 15 minut držel v jamce a nevypadl nebo se nepohnul.

Interpretace výsledků

Výsledky přečtěte za 15 minut



Negativní výsledek dává **jednu** růžovo-červenou kontrolní linii v horní části okénka.



Pozitivní výsledek dává **dvě** růžovo-červené linie. Vzorky se slabší pozitivitou dávají slabší linie, ale každá slabá linie je považována za pozitivní výsledek.



Chybný výsledek je pokud se neobjeví žádná linie, objeví se jen vzorková linie nebo pozadí interferuje se čtením výsledku.

Pozitivní moč - pozitivní na pneumokok. pneumonii

Negativní moč* - předpokládaný negativní výsledek pro pneumokokovou pneumonii. Naznačuje, že neprobíhá ani neproběhla pneumokoková infekce.

Pozitivní CSF - pozitivní na pneumokok. meningitidu

Negativní CSF* - předpokládaný negativní výsledek na pneumokokovou meningitidu

*Nevylučuje však počátek onemocnění *Streptococcus pneumoniae*, kdy není antigen v moči ještě prezentován nebo jeho hladina ještě nepřesáhla prahové hodnoty testu.