




Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo


Plná krev - provedení testu

Odtrhněte jeden test

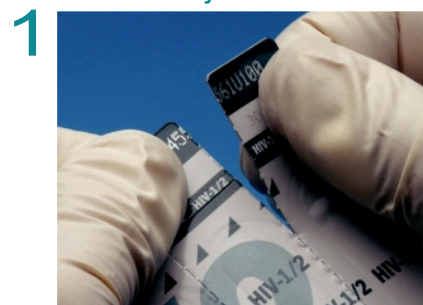


Upozornění: Jednotlivé testy by měly být odtrhávány z pravé strany karty pro zachování čísla šarže, které je uvedeno na levé straně karty.


Sejměte ochranou pásku

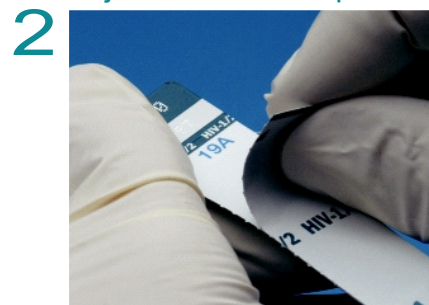


Přidejte vzorek

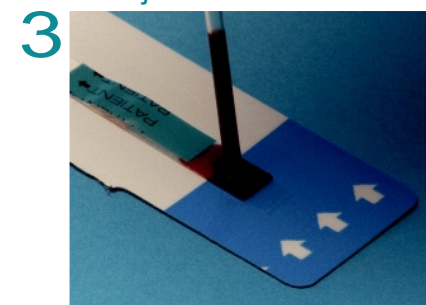


Přidejte vzorek kapilární nebo venózní krve (50µl) do testovacího proužku

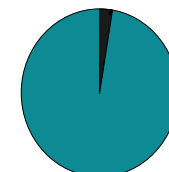

Vyčkejte 1 minutu

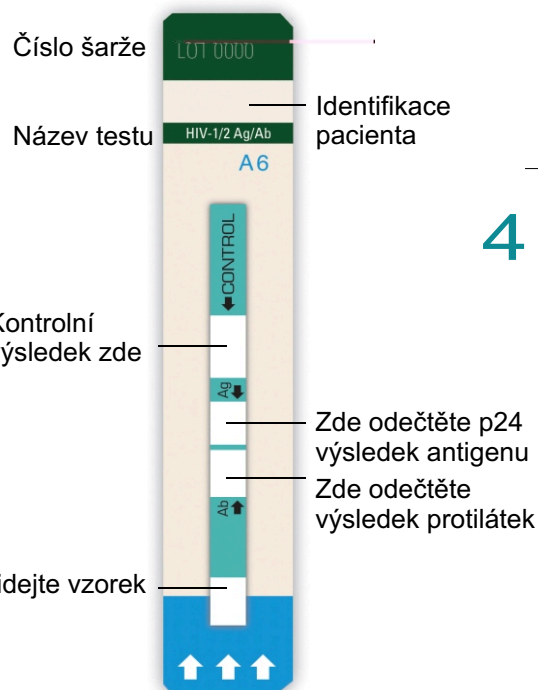


4 Přidejte pufr

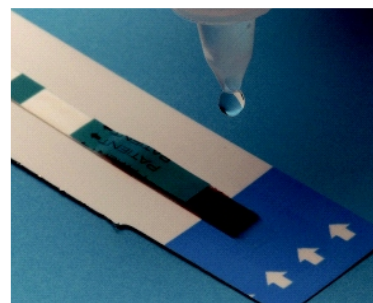


Přidejte jednu kapku pufru

5 Vyhodnocení testu

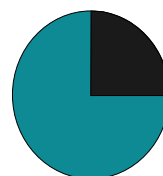

Vyčkejte 20 minut

HIV-1/2 Ag/Ab Combo

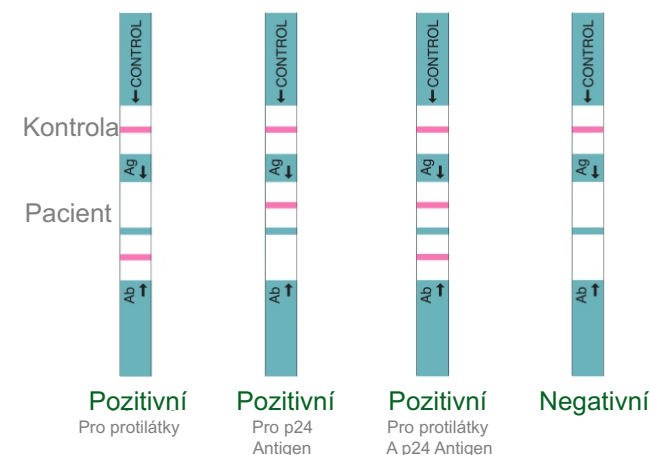




Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo


Sérum/Plazma - provedení testu

1 Odtrhněte jeden test

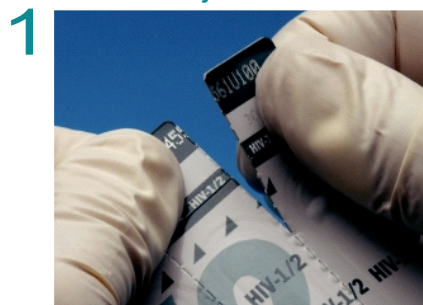


Upozornění: Jednotlivé testy by měly být odtrhávány z pravé strany karty pro zachování čísla šarže, které je uvedeno na levé straně karty.


2 Sejměte ochranou pásku

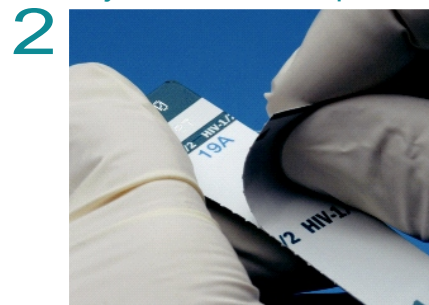


3 Přidejte vzorek

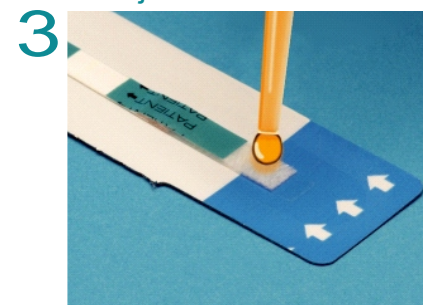

Přidejte vzorek séra nebo plasmy (50µl) do testovacího proužku.

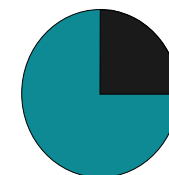


Vyčkejte 20 minut

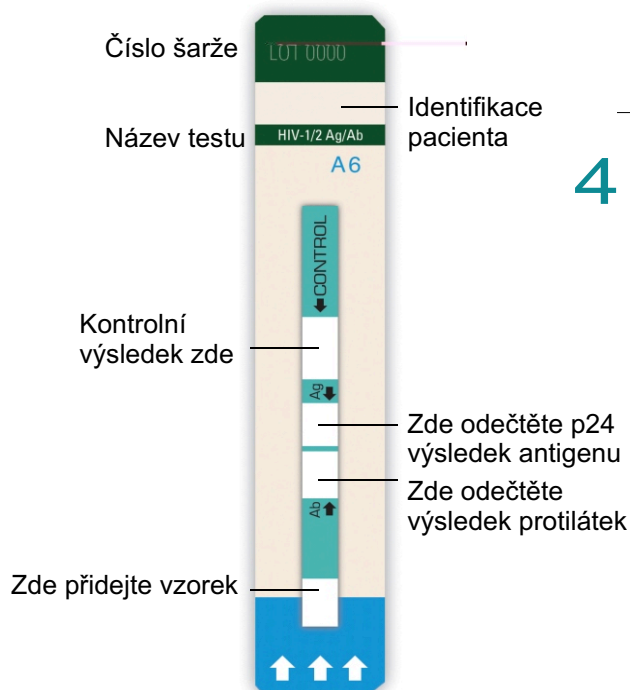

4 Vyhodnocení testu

HIV-1/2 Ag/Ab Combo

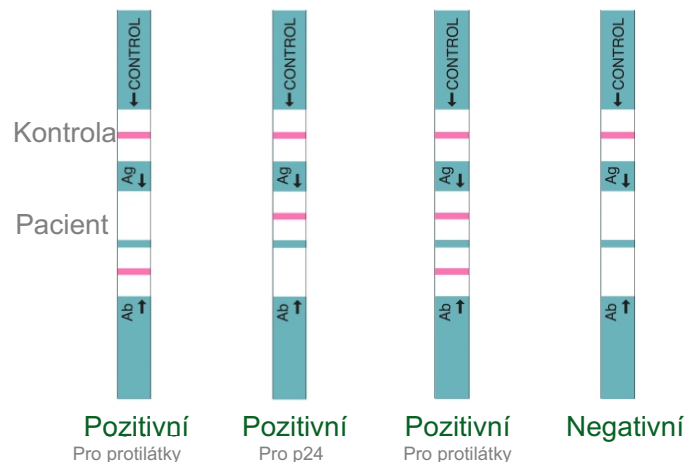

Determine testy :

Determine™ HBsAg
Determine™ Syphilis TP

determine

www.determinetest.com
enquiry@determinetest.com