




Determine Syphilis TP


Plná krev - provedení testu

1 Odtrhněte jeden test

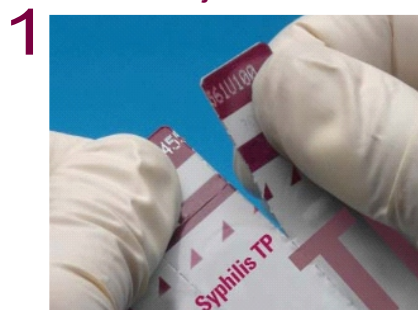


Upozornění: Jednotlivé testy by měly být odtrhávány z pravé strany karty pro zachování čísla šarže, které je uvedeno na levé straně karty.

2 Sejměte ochranou pásku

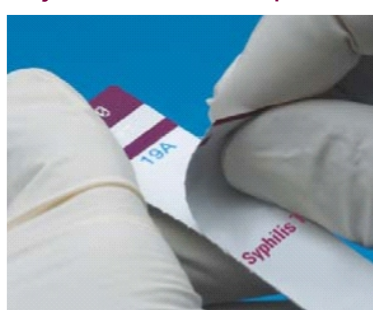

3 Přidejte vzorek

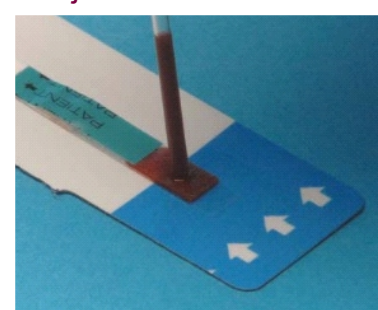


Přidejte vzorek kapilární nebo venózní krve (50µl) do testovacího proužku



Vyčkejte 1 minutu

4 Přidejte pufr

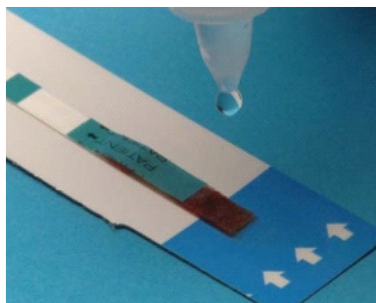


Přidejte jednu kapku pufru

5 Vyhodnocení testu



Vyčkejte 15 minut

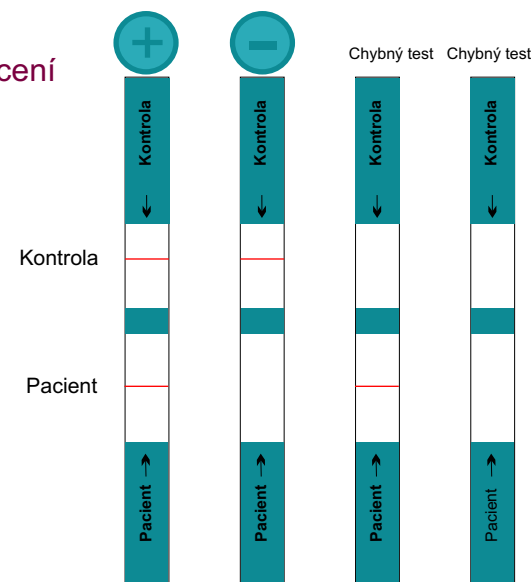




Determine Syphilis TP


Sérum/Plazma - provedení testu

1 Odtrhněte jeden test

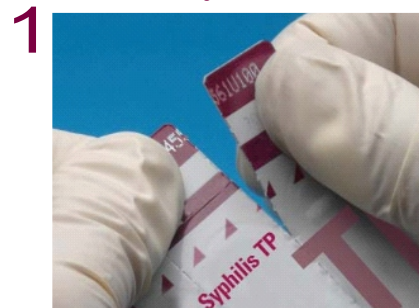


Upozornění: Jednotlivé testy by měly být odtrhávány z pravé strany karty pro zachování čísla šarže, které je uvedeno na levé straně karty.

2 Sejměte ochranou pásku

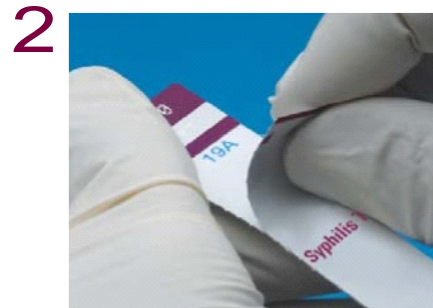

3 Přidejte vzorek

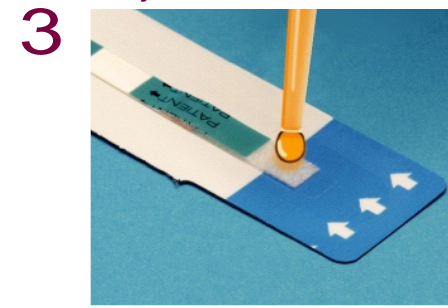


Přidejte vzorek séra nebo plasmy (50µl) do testovacího proužku



Vyčkejte
15 minut

4 Vyhodnocení
testu

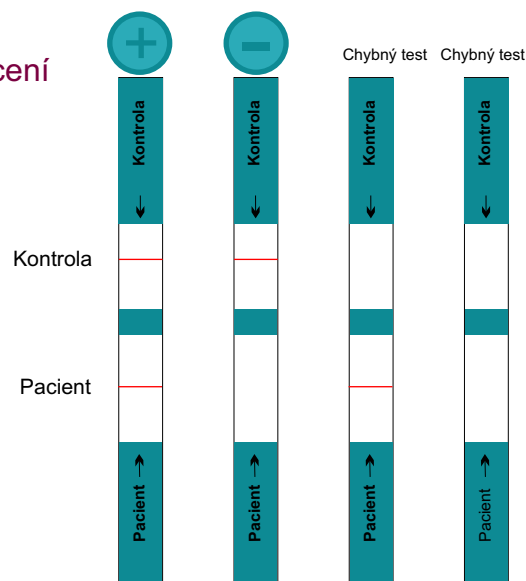

Determine testy

Determine™ HBsAg

Determine™ HIV-1/2

determine

www.determinetest.com
enquiry@determinetest.com