

Rychlý průvodce převodem výsledků do ScanPointu

1 Proved'te měření

2 Vložte skener do komunikačního stojanu

3 Spust'te ScanPoint LC

Pro spuštění 2x klikněte na ikonu, která je umístěna na ploše




ScanPoint zobrazí nevyplněný záznam o vyšetření a objeví se upozornění:

Zařízení obsahuje nové měření
(Device is holding new scan)
nebo
Zařízení je naplněno měřeními.
(Device is holding complete scan)

4 Tlačítkem "Submit" převed'te měření do počítače

Dokud nebude ukončen přenos naměřených výsledků do počítače, NEVYJÍMEJTE skener z komunikačního stojanu. Skener lze vyjmout až po rozsvícení zeleného ukazatele.

Komunikační stojan

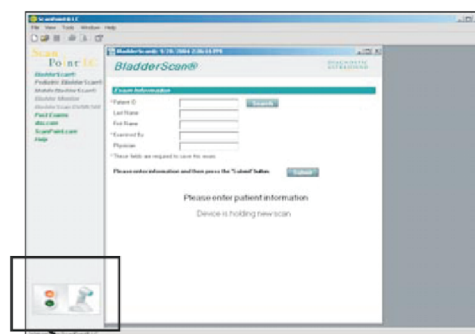

Ukazatel stavu: Nevyjímejte skener z kom. stojanu, pokud ukazatel svítí červeně

5 Zobrazení výsledků vyšetření na obrazovce

- Na displeji bude zobrazen výsledný obsah močového měchýře v mililitrech.
- Šest B-mode obrázků, zachycujících různé pohledy na močový měchýř.

6 Uložení výsledků měření

a. Zadejte informace o pacientovi

- Patient ID (zadejte nebo můžete vybrat kliknutím na tlačítko Search)
- Examined by (jméno osoby, která prováděla vyšetření)
- Patient's Last name and First name (příjmení a jméno pacienta)
- Name of Physician (jméno lékaře)

(Do pole Patient ID zadávejte pouze číslice nebo písmena. V případě, že do pole napíšete znaky nebo symboly, nepůjde vyšetření uložit !)

b. Tlačítkem "Save Exam" se otevře dialogové okno "Uložit jako..."

- Vyberte složku, kde chcete vyšetření uložit
- Jméno souboru, pod nímž bude vyšetření uloženo se automaticky objeví ve formátu: pacientova ID_datum_čas
- Vyšetření můžete uložit pod tímto jménem nebo zadat jiné

c. Klikněte na Uložit

7 Zobrazení uložených vyšetření

a. Z menu na levé straně okna ScanPointu LC vyberte "Past Exams" (Uložená měření).

b. Pro zobrazení seznamu uložených měření udělejte následující:

Zadejte pacientovu ID (napíšte nebo vyberte po klepnutí na "Search"), klikněte na "Go".
NEBO, klikněte na "Show All" pro zobrazení seznamu všech uložených měření.

c. Zaškrtněte jedno nebo více vyšetření, které vás zajímá a klikněte na "Open Selected" (Otevřít zvolená).

