


# Rychlý průvodce převodem výsledků do ScanPointu

Poznámka: Skener BVI 6400 pojme výsledky nejméně deseti vyšetření nebo maximálně 17 nahraných záznamů, podle délky jednotlivých zpráv. (Maximální délka zprávy je 8 vteřin)

## 1 Vložte skener do komunikačního stojanu

Komunikační stojan

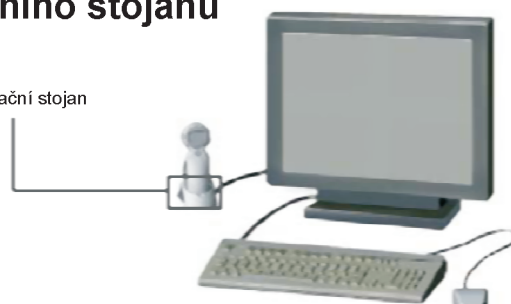

## 2 Zadejte heslo a jméno do ScanPointu

Poté co vyplníte políčka s přihlašovacím jménem a heslem, klikněte na tlačítko Sign in.


Přihlašovací  
jméno

Heslo

Sign in

## 3 V nabídce zvolte položku "Mobile BladderScan"


Mobile BladderScan

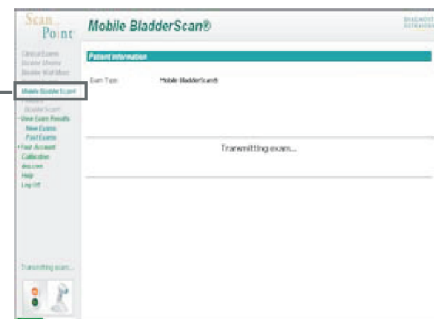

## 4 Zvolte "View Exam Results" > "New Exams" v menu

Zobrazí se seznam nových vyšetření


Nová vyšetření

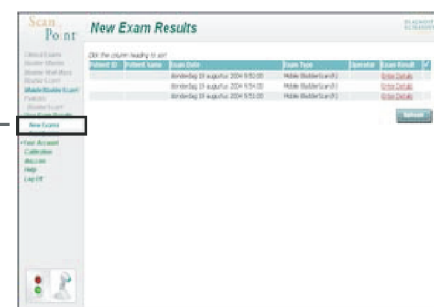

## 5 Vyšetření si prohlédnete kliknutím na "Enter Details"

Vyberte vyšetření jehož detaily chcete zobrazit a klikněte na "Enter Details"

Zobrazit detaily

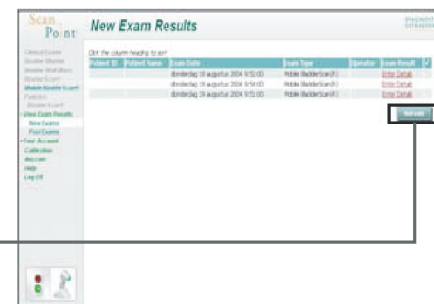


## Rychlý průvodce převodem výsledků do ScanPointu

6

### Klikněte na tlačítko "Listen..."

Pro poslech nahrávek uložených u vyšetření klikněte na tlačítko "Listen.."

Poslech

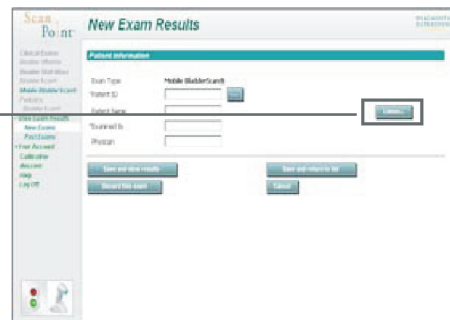

Pro uložení vyšetření pokračujte body 7A & 7B.  
Pokud chcete odstranit vyšetření nebo opustit nabídku pokračujte na bod 8.


7A

### Zadejte informace o pacientovi

Do určených polí zadejte informace o pacientovi. Všechna pole označená hvězdičkou musí být vyplněna.

(Do pole Patients ID pište pouze číslice nebo písmena. V případě, že obsahuje jiné znaky nelze vyšetření uložit)

Informace o pacientovi

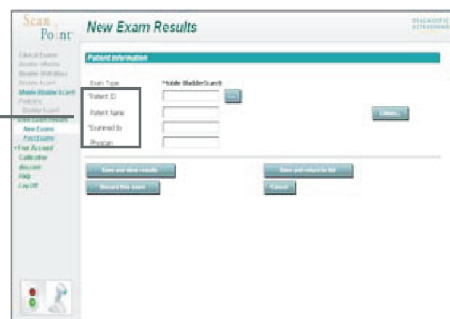

7B


### Uložení informací o pacientovi

- Klikněte na tlačítko "Save and view results" pro uložení a prohlédnutí informací o pacientovi, měření a ultrazvukových obrázků.

Uložit a prohlédnout  
výsledky vyšetření

- Klikněte na tlačítko "Save a return to list" pro uložení informací o pacientovi, bez prohlédnutí měření a ultrazvukových obrázků

Uložit výsledky a návrat  
do seznamu

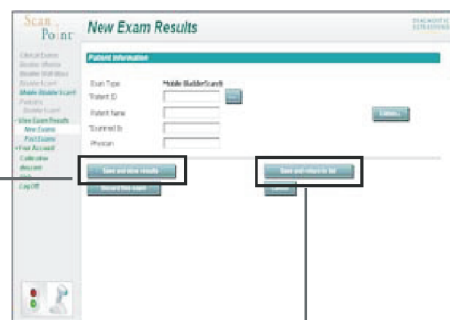

8

### Odstranit vyšetření nebo opuštění nabídky

- Klikněte na tlačítko "Discard this exam" pro odstranění vyšetření. Vyšetření bude nezvratně ztraceno.

- Klikněte na tlačítko "Cancel" pro návrat na obrazovku s nabídkou "New Exam Results". Toto vyšetření bude ve ScanPointu dostupné, dokud nebude uloženo nebo odstraněno.

Odstranit vyšetření

Storno

