


Rychlý průvodce použitím BLADDERSCANU BVI 6400

1


Skenování močového měchýře

a) Vyberte pohlaví

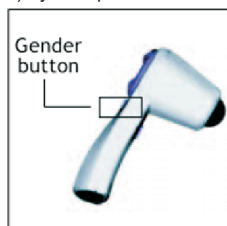


Jako ženu skenujte **jen** pacientky, které **nepodstoupily** hysterektomii


b) Umístěte gelovou podložku

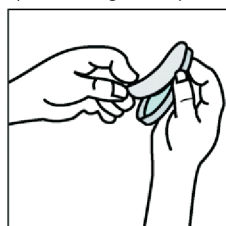

Rozbalte krabičku s podložkami

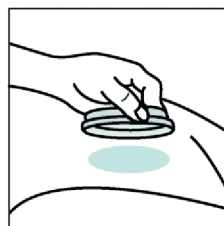


Umístěte gelovou podložku na abdomen pacienta, asi 3 cm nad stydkou sponu

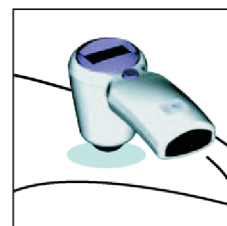


Umístěte hlavu skeneru na gelovou podložku

c) Zamiřte na měchýř

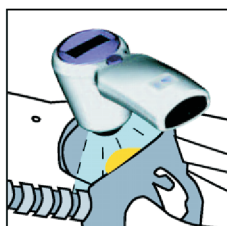


Zamiřte hlavu skeneru nepatrně dolů poblíž pacientovy stydké spony


d) Stiskněte tlač. skenování

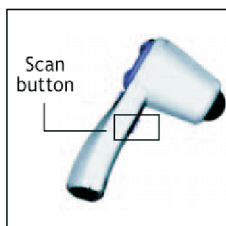

e) Ověřte měření

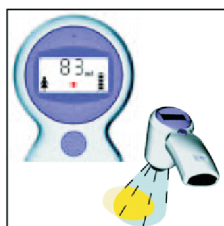

Blikající šipky=opakujte měření. Jestliže šipka ukazuje doleva, zamiřte více doleva a opakujte měření.

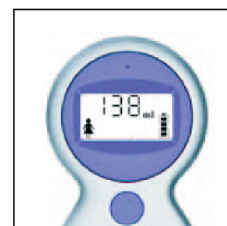

Neblikající šipky nebo žádné šipky = měření je správné. Není potřeba opakovat měření

2



Nahrávání zvukového záznamu

2A

Zmáčkněte a podržte horní tlačítko (pohlaví) a počkejte dokud se neobjeví ikona reproduktoru

Po zaznění tónu začněte mluvit do mikrofону

Uvolněte horní tlačítko a poslechněte si zvukový záznam

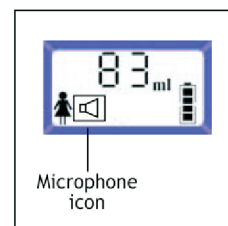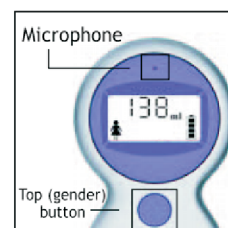

2B

Pro přemazání hlasové poznámky, opakujte bod 2A

3

Pro akceptování hlasové poznámky a pokračování ve skenování, opakujte postup od bodu 1

4

Pokud jste měření dokončili nebo je skener plný, přeneste vyšetření do ScanPointu



Rychlý průvodce použitím BLADDERSCANU BVI 6400

Poznámka: Pro zapnutí skeneru, pokud je ve spánkovém režimu, stiskněte a uvolněte tlačítko a počkejte na tón

1

- a) Pro volbu měření ženy, stiskněte tlačítko pohlaví, které je umístěné pod LCD displejem. Po zvolení ženy se objeví ikona ženské postavy na displeji. Jako ženu skenujte jen pacientky, které nepodstoupily hysterektomii. Pro ostatní pacienty, stiskněte tlačítko tak, aby na displeji nebyl obrázek ženy.
- b) Prohmatejte pacientovi oblast nad symfýzou. Umístěte Sontac ultrazvukovou gelovou podložku doprostřed na pacientovo břicho, přibližně 3 cm nad stydkou sponu.
- c) Umístěte skener (zaobleným koncem) na gelovou podložku. Zaměřte ho směrem k předpokládanému umístění moč. měchýře. Pro většinu pacientů to znamená zaměření hlavičky mírně dolů směrem k pacientově kostrči.
- d) Stiskněte a uvolněte skenovací tlačítko umístěné na spodní straně skeneru. Objeví se prohlížecí symbol v pravém horním rohu na LCD displeji.

Až uslyšíte tón, skenování je kompletní a velikost moč. měchýře bude zobrazena na LCD displeji.

Ověřte si, že skener byl správně zaměřen, ve směru blikající zaměřovací šipky. Jestliže se objeví zaměřovací šipka na displeji pod naměřeným obsahem, je potřeba znovu provést měření v indikovaném směru blikající šipky. Posuňte skener žadáním směrem. Představte si ultrazvukové vlny, které směřují ven od hlavičky skeneru směrem k pacientovu tělu. Jestliže blikající šipka šipky směřuje doleva, zaměřte skener tak, že ultrazvukové vlny budou promítány na obrazovce dále doleva. Je nutné opakovat vyšetření, dokud se neobjeví neblíkající šipka, příp. na displeji nebude žádná šipka.

2

Nahrávání zvukového záznamu.

2A

Pro nahrání zvukového záznamu a uložení výsledku měření do paměti BVI 6400, stiskněte a podržte horní tlačítko. Po zaznění tónu namluvte záznam mluvením do mikrofону, který se nachází nad LCD displejem. Uvolněte horní tlačítko a poslechněte si nahraný zvukový záznam.

2B

Pro přemázání hlasové poznámky, opakujte bod 2A

3

Pro akceptování hlasové poznámky a pokračování ve skenování dalšího pacienta, počkejte, až přestane blikat ikona reproduktoru. Pokračujete-li ve skenování, opakujte postup od bodu 1.

Poznámka: BVI 6400 dokáže uchovat minimálně 10 komentovaných měření.

4

Pokud je paměť BVI 6400 plná, zobrazí se na LCD displeji nápis "FULL". Pro uvolnění paměti BVI 6400, přeneste komentované záznamy do ScanPointu.

Poznámka: Pokud je paměť plná, skener bude i nadále měřit obsah moč. měchýře, ale nebude možné ukládat komentované záznamy. Hodnoty měření nebudou ukládány, dokud nebude obsah paměti přenesen do ScanPointu.

