

VEINOPLUS® V.I.

Co je VEINOPLUS® V.I. ?

VEINOPLUS® V.I. je bateriový svalový stimulator (CE medical: class IIa). VEINOPLUS® V.I. elektricky stimuluje "lýtkovou pumpu", která zabezpečuje zpětnou cirkulaci krve směrem k srdci.

VEINOPLUS® V.I. ... účinná technologie

VEINOPLUS® V.I. má unikátní schopnost léčebného účinku symptomů venózních onemocnění (od pouhé bolesti nohou až po vážnější onemocnění). Tyto efekty* byly demonstrovány a dokumentovány v řadě klinických studií prováděných již od roku 2004 ve Francii, Velké Británii, USA a v Rusku.

VEINOPLUS® V.I. ... bezpečná technologie



VEINOPLUS® V.I. vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním standardům vytvořených v USA (norma AAMI/ANSI NS-4 1986/2002). VEINOPLUS® V.I. může být používán i během těhotenství, jak je ukázáno v klinických studiích provedených ve Francii!

Jak používat Using VEINOPLUS® V.I. ...velice snadné!

- přiložte na každé lýtko jednu elektrodu, pokud chcete léčit obě končetiny nebo přiložte obě elektrody na jedno lýtko, pokud chcete léčit jenom jednu končetinu
- nastavte intenzitu tak vysokou, abyste cítili silně, ale přitom ještě pohodlně snesitelné kontrakce v lýtku; přístroj se automaticky po 30 minutách vypne.

Kdy používat VEINOPLUS® V.I. ?

To závisí na Vašich symptomech*:

- minimálně jednou denně při zahájení léčby,
- pokud cítíte potřebu léčby, není žádné riziko nadměrného používání!
... čím častěji VEINOPLUS® V.I. používáte, tím efektivnější je léčba.

Jaké jsou kontraindikace?

Lidé s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem nesmí tento přístroj použít. Pro další upozornění nebo varování odkazujeme na Návod k použití. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na svého lékaře.

Další otázky ?

Pro více podrobností odkazujeme na webovské stránky www.veinoplus.cz.

* efekty nejsou garantovány ve 100%, mohou se lišit a závisí také na léčených symptomech.
1 - Le Tohic A. et al., Efekt elektrické stimulace (VEINOPLUS®) na dolní končetiny... (citovaný odkaz)

Výrobce :

Ad Rem Technology
162, ruede Faubourg Saint-Honoré 75008
Paris - FRANCE - Tél : +33 (0)1 42 60 00 22
www.adremtechnology.fr
ISO 13485:2012

Distribuce v České republice :

MEDIAL spol. s r.o.
www.medial.cz
Tel.: 296 328 313
296 328 328
E-mail: objednavka@medial.cz

LL-V09V1A-GB-2013-04

VEINOPLUS® V.I.

Nový způsob léčby žilních onemocnění

Venózní insuficience

Bolesti v nohou, pocit "těžkých" nohou

Venózní nemoci během těhotenství

Napuchlé, oteklé nohy nebo kotníky

Post-trombotický syndrom (PTS)

Rizikové situace pro Vaše dolní

končetiny ...



www.veinoplus.com

FRENCH
TECHNOLOGY


CE 0535

VEINOPLUS® V.I.


hlavní klinické výsledky :

SNÍŽENÍ BOLESTI V NOHOU

Bolest v nohou u populace pacientů s venózní insuficiencí¹

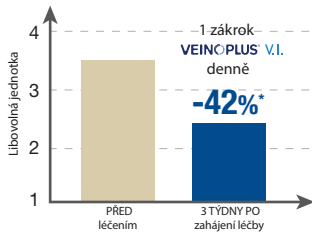


Bolest v nohou u populace žen v těhotenství s venózní insuficiencí²

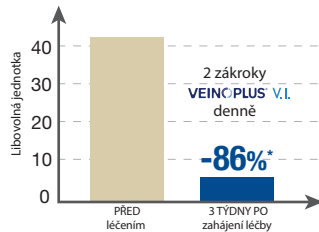

SNÍŽENÍ OTOKŮ

Snížení otoků kotníků u 30 pacientů (CEAP klasifikace C3) po 30 dnech léčení přístrojem VEINOPLUS® V.I.3

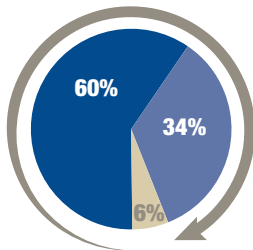


94% případů

- Úplná redukce
- Částečné snížení
- Žádná redukce

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA

Redukce negativního vlivu žilní insuficience² na populaci 38 těhotných žen

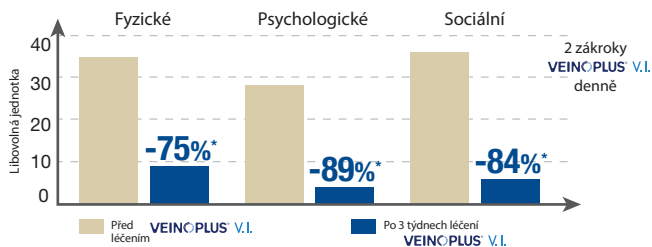

VEINOPLUS®

je indikován pro :

Symptomy venózní insuficience

- Bolavé, bolestivé, "těžké" nohy
- Venózní nemoci spojené s těhotenstvím
- Oteklé nohy nebo kotníky
- Otoky dolních končetin*
- Noční křeče*
- Neklidné nohy
- Post-trombotický syndrom
- Bércové vředy**

je také doporučován pro :

Rizikové situace

- Prodělaná hluboká žilní trombóza
- Riziková povolání (čišník, letecké posádky...)
- Dlouhé sezení nebo stání
- Nepohyblivé nohy (sádra...)
- Lety na dlouhé vzdálenosti (> 4h)
- Nedostatek cvičení
- Nadměrná váha, obezita
- Křečové žíly

88% úspěšnost léčby
dle našich
nejnovějších studií***



* v případě venózní příčiny **pod lékařským dohledem
*** studie na 100 pacientech

1- Zuccarelli F, Launay J, LeMagrex J, Mollard R, Fargier P, Pujo M. Activation of Calf Muscle Pump by VEINOPLUS® V.I. Stimulation (Fr). Angéiologie 2005;57:48-54. • 2. LeTohic A, Bastian H, Pujo M, Beslot P, Mollard R, Madlenat P. Effect of electro-stimulation (Veinoplus) on lower limbs venous insufficiency-related symptoms during pregnancy. Gynecol Obstet & Fertit 2009;37:18-24 (data from group N°2) • 3. BOGACHEV V.Y et al : Electromuscular stimulation with VEINOPLUS® V.I. for the treatment of chronic venous edema. International Angiology (2011).

* significant p < 0,001

**CEAP : International Classification for Chronic Venous Disorders (C3 = Edema)