




Diagnostika HIV
testy 4. generace

determine
HIV-1/2 Ag/Ab Combo
Detekce akutní infekce HIV



Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo Sérum/Plazma - provedení testu

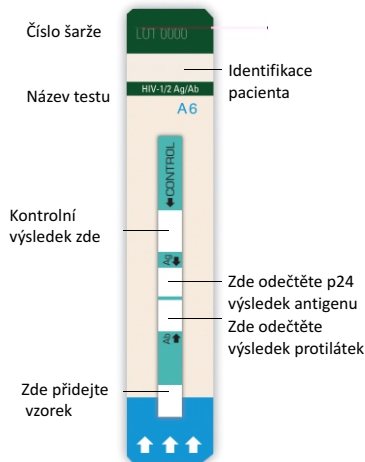


1 Odtrhněte jeden test




Upozornění: Jednotlivé testy by měly být odtrhávány z pravé strany karty pro zachování čísla šarže, které je uvedeno na levé straně karty.

2 Sejměte ochranou pásku

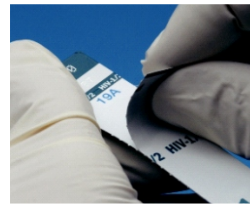

3 Přidejte vzorek

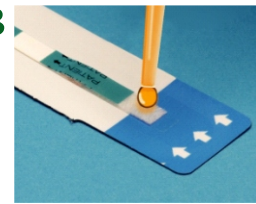


Přidejte vzorek séra nebo plasmy (50μl) do testovacího proužku.



Vyčkejte 20 minut


4 Vyhodnocení testu

HIV-1/2 Ag/Ab Combo

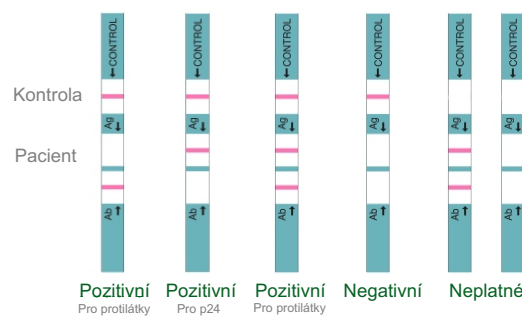


Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo Plná krev - provedení testu

1 Odtrhněte jeden test

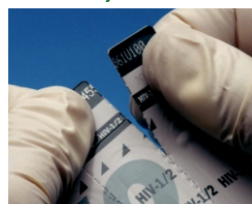

Upozornění: Jednotlivé testy by měly být odtrhávány z pravé strany karty pro zachování čísla šarže, které je uvedeno na levé straně karty.

2 Sejměte ochranou pásku

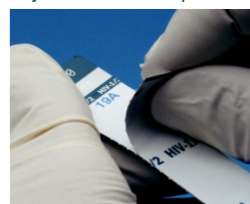


3 Přidejte vzorek




Přidejte vzorek kapilární nebo venózní krve (50μl) do testovacího proužku.



Vyčkejte 1 minutu

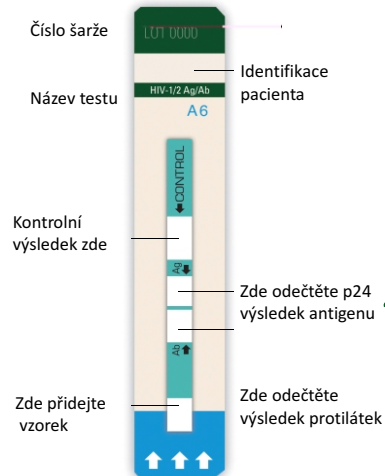

4 Přidejte pufr

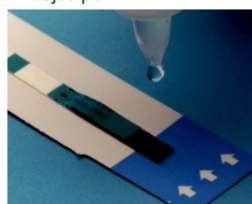

Přidejte jednu kapku pufru.

5 Vyhodnocení testu

HIV -1/2 Ag/Ab Combo



Vyčkejte 20 minut

