

# Pokyny pro pacienty Endoskopie tenkého střeva kapslí PillCam<sup>®</sup> se zařízením SensorArray

Pacient: \_\_\_\_\_

Datum vyšetření: \_\_\_\_\_

Pro zajištění co nejlepších výsledků endoskopie tenkého střeva kapslí PillCam se pečlivě a zcela řiďte pokyny lékaře.

## Jeden den před endoskopií kapslí

1. Po obědě začněte s předepsanou tekutou stravou
2. **Nejezte ani nepijte**, s výjimkou nutných léků s malým množstvím vody, a to po dobu 10 hodin před endoskopií kapslí.

## V den endoskopie kapslí

1. **Dvě hodiny před vyšetřením** neberte žádné léky.
2. **Na oblast břicha neaplikujte pleťové mléko, ani pudr.**
3. **Oblečte si volné, dvoudílné oblečení.** Oblečení na horní části těla by mělo být neprůhledné, nikoli průsvitné.
4. **Dostavte se k vašemu lékaři ve stanovenou dobu:** \_\_\_\_\_

## Po požití kapsle PillCam SB



*Endoskopické vyšetření kapslí bude trvat přibližně 8-9 hodin. Svého lékaře neprodleně kontaktujte, pokud v průběhu tohoto testu trpíte bolestmi břicha, nevolností či zvracením.*


1. **Dvě hodiny po požití kapsle PillCam SB** můžete začít pít bezbarvé tekutiny.
2. **Po čtyřech hodinách můžete lehce posvačit.** Po skončení vyšetření můžete pokračovat s normální stravou.
3. **Zkontrolujte modře blikající světlo záznamníku DataRecorder každých 15 minut** a ujistěte se, že světlo bliká dvakrát za sekundu. Pokud světlo přestane blikat nebo změní barvu, zaznamenejte si příslušný čas a kontaktujte svého lékaře.
4. **Použijte připravený Formulář událostí endoskopie kapslí pro zaznamenání času jakékoli události**, jako je jídlo, pití, nebo změna vaší činnosti. Vraťte vyplněný *Formulář události* lékaři spolu s vráceným zařízením.
5. **Vyhněte se silným elektromagnetickým polím** jako jsou zařízení MRI nebo amatérská rádia, a to od polknutí kapsle až dokud ji nevyloučíte se stolicí.
6. **Neodpojujte zařízení a neodstraňujte DataRecorder**, a to kdykoli v průběhu zákroku.
7. **Se zařízením DataRecorder zacházejte s co největší pozorností.** Vyhněte se náhlým pohybům a nárazům do zařízení DataRecorder.
8. **Vyhněte se přímému vystavení slunečnímu svitu.**

## Po dokončení endoskopie tenkého střeva

V určenou dobu se vraťte do ordinace lékaře k odstranění zařízení.

**Nebo:** Pokud obdržíte pokyny k odstranění zařízení na konci endoskopie kapslí, proveďte následující:

1. Sejměte čidla SensorArray z pacienta zatažením za jazýček na každém z přilnavých krytů. Netahejte za dráty nebo svody zařízení SensorArray!

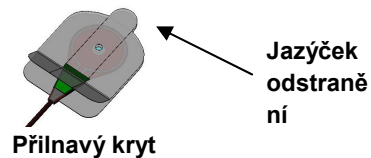

2. Sejměte zařízení DataRecorder a uschovejte ho na bezpečném místě.
3. Vraťte veškeré vybavení do ordinace vašeho lékaře co nejdříve. Se zařízením DataRecorder a dalším zařízením zacházejte opatrně, a nevystavujte je nárazům, vibracím, nebo přímému slunečnímu světlu.

❗ Pokud si nejste jisti, zda kapsle opustila vaše tělo a začnete pociťovat nevolnost, bolest břicha nebo zvracení, kontaktujte lékaře pro vyhodnocení.

❗ Vyšetření MRI zatímco je kapsle PillCam ve vašem těle může mít za následek poškození zažívacího traktu nebo břišní dutiny. Pokud si nejste jisti, zda je kapsle mimo vaše tělo, kontaktujte lékaře pro vyhodnocení a možný rentgen břicha před tím, než podstoupíte vyšetření MRI.

## Formulář událostí endoskopie kapslí

Jméno pacienta:		ID č.:
Čas	Událost (jídlo, pití, činnost a nezvyklé pocity)	
	Požití kapsle PillCam	
Čas návratu do ordinace: _____	Zvláštní pokyny:	
Kontakt v případě potřeby:		