



Cert ISO 13485:2003
MD 92931



Rychlá a účinná úleva od bolesti bez použití léků

- kdekoliv a kdykoliv je potřeba...



Co to je PAIN@GONE

PAIN@GONE je praktický a účinný prostředek k úlevě od bolesti, založený na TENS principu (Transcutaneous Electric Nerve Stimulation), tzn. principu stimulace nervů a nervových zakončení nízkofrekvenčním elektrickým nábojem produkovaným piezoelektrickými krystaly. Signál z mozku potom vyzve tělo k uvolnění endorfinů - tělu přirozených látek k potlačení bolesti. S výhodou ho lze použít i při neinvazivní akupunktuře v místech příslušných akupunkturních bodů jako neocenitelný prostředek při každodenním používání k úlevě od chronické bolesti. **PAIN@GONE** nepotřebuje údržbu, nelze se předávkovat a lze ho používat kdykoliv a kdekoliv. Pravidelné používání vede k úlevě od bolesti, zvýšení mobility a redukci v denní spotřebě analgetik. Klinické studie prokázaly jeho účinnost u 76% pacientů trpících chronickými bolestmi a doporučení získal i jako účinná doplňková léčba u sportovních úrazů.


Vlastnosti a výhody

- Léčba bez léků
- Bezpečné a snadné používání
- Klinicky testováno
- Zdravotnický prostředek třídy IIa ,CE 0086
- Žádné vedlejší účinky
- Žádné baterie, vodiče, ochranné prvky či gely
- Použití v místě bolesti či na akupunkturní body
- Pracuje i přes lehké oděvy
- Účinní 2-3 roky

Účinnost

- Artritida
- Revmatismus
- Osteoporóza
- Bolesti zad
- Šciatica - ischias
- Spondylitis - zánět obratlů
- Migréna
- Sportovní úrazy
- Bolest svalů a kloubů
- Tenisový loket
- Fibromyalgia

Jednoduchá aplikace po dobu 30 vteřin v místě bolesti nebo na akupunkturních bodech.

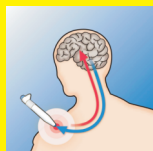

Žádejte ve své lékárně

Medial spol. s r.o.
tel.: +420 271028300

Zákaznické centrum
fax: +420 271028320

Obchodní 110 25170 Čestlice
E-mail : info@medial.cz <http://www.medial.cz>

SHRnutí KLINICKY PROKÁZANÝCH ÚČINKŮ PAIN®GONE

Nezávislé testy prokázaly, že PAIN®GONE je účinný léčebný prostředek na potlačení bolesti. Zastavení či zmírnění akutní nebo chronické bolesti se projevilo až u 76% pacientů. Jedná se o spolehlivou léčebnou alternativu bez použití léků.

***Zkušenosti s léčbou akutních i chronických bolestí v oblasti krční páteře**

(prim. MUDr. Ondřej Horáček, Klinika rehabilitace FN Motol)

Terapie pomocí PAIN®GONE je účinná jak u pacientů s akutními, tak i s chronickými bolestmi krční páteře. U pacientů s akutními bolestmi se efekt projevuje dříve, výrazněji, a u většího počtu pacientů ... u pacientů se subakutními a chronickými bolestmi ... se zmírnění bolesti a zlepšení rozsahu hybnosti projevuje až po 2 týdenní léčbě. Celkově 70% pacientů považovalo terapii za užitečnou a v případě potřeby by ji podstoupili znovu. Zatímco u pacientů s akutními bolestmi krční páteře může být metoda dostatečně účinná jako monoterapie, pak ve skupině se subakutními a chronickými bolestmi krční páteře je vhodná kombinace s dalšími rehabilitačními postupy ... a léčba musí být vícedýdenní (minimálně 2 týdny).

***Klinická studie v rehabilitační praxi**

(MUDr. Ladislav Žigo, VRÚ Slapy)

Klinická studie testovala používání PAIN®GONE u různých diagnóz, například Syndrom karpálního tunelu, Rameno-Impingment sy supraspinatus, Tenze cephalae, Úponové bolesti, Entezopatie adduktorů kyčelních kloubů, Chronický vertebrogenní syndrom LS páteře a řadě dalších onemocnění (Epikondylgie laterální a mediální, Gonartroza aktivní a chronická, Koxartroza a další). Úleva a zmírnění potíží se projevilo u 50%-75% pacientů. Tato studie prokazuje, že PAIN®GONE zmírňuje bolest u jednotlivých diagnóz a je dobrou alternativou jako součást fyzikální terapie při respektování ochranné a informační funkce bolesti. Je to vhodný doplněk jiné léčby, vede ke snížení spotřeby analgetik a pacient si po vyšetření a zacvičení lékařem může léčbu provádět v domácím prostředí, bez bezpečný, snadno použitelný a nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky. Je to účinný doplňkový prostředek pro pacienty trpící chronickou bolestí pohybového aparátu.

***První zkušenosti s přístrojem PAIN®GONE**

(MUDr. Jan Vacek, Ordinance léčebné rehabilitace a myoskeletální medicíny Alfa centrum).

Pokusili jsme se v ambulantní praxi vyzkoušet přístroj Pain Gone na souboru dvaceti pacientů s laterální epikondylgií. Bez výraznějšího organického korelátu, bez předchozí aplikace steroidní léčby, operace. U šestnácti pacientů došlo ke zlepšení obtíží, tzn. snížení bolesti a zvýšení schopnosti zátěže postižené končetiny, čtyři pacienti byli beze změn. Nikdo se nezhoršil. Efekt přístroje byl u daného souboru zřejmý. U jedenácti pacientů se zlepšila funkce postižené končetiny do té míry, že byli schopni ji začít opět zatěžovat. Závěr: Naše pozorování ukázalo, že na vybraném vzorku pacientů se elektrostimulace prahovými algickými, ještě snesitelnými impulzy charakteru TENS přístrojem PAIN®GONE ukázala jako přínosný příspěvek ke komplexní léčbě epikondylgií.

Žádejte ve své lékárně