

Pomůcky Samarit

Pro rehabilitaci, domácí péči a zdravotnická zařízení



Samarit Rollbord

Pomůcka pro umístění imobilních pacientů




Samarit Slide-Up

Podložka pro umístění pacienta



Samarit Turnplate

Otáčecí podložka pro umístění pacienta z lůžka na židli nebo na kolečkové křeslo

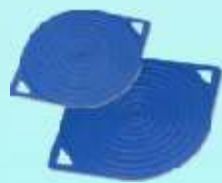

Samarit Glideboards a příslušenství

Pracovní výrobky usnadňující přesun pacientů



Samarit Pat-Sling Pull-Up Sling

Podložka určená ke zvedání



Pat-Sling

a přemístění pacienta



Pull-Up



Samarit CareGlide

Pro snazší polohování dlouhodobě nemocných

Namáhavou fyzickou práci ošetřujícího personálu při rehabilitaci i domácí péči ulehčí vhodné pomůcky....

SAMARIT
No. 1 for Care Applications

Samarit Turnplate

pro p emíst ní stojícího a sedícího pacienta




Oto ná podložka (ø 30 cm a 38 cm)

- p emíst ní pacienta z l žka na židli nebo na kole kové k eslo
- pohodlné používání
- kontrola rotace
- snadné íšt ní
- bezpečnost
- dlouhá životnost

Využití: nemocnice, domovy
s pe ovatelskou službou a
domácí pé e

Samarit Turnplate
ø 30 cm: Art. No. 480-0100
ø 38 cm: Art. No. 480-0380

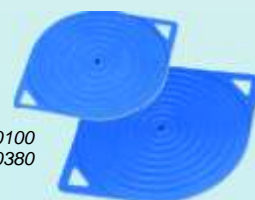

Samarit Slide-Up

pro p emíst ní pacienta

Samarit Slide-up

Podložka ur ena k pohodlnému p emíst ní pacienta. Mírn klouzavý materiál na spodní stran podložky, protiskuzová úprava pod pacientem a dva pevné úchyty na obou stranách podložky umož ůjí pohodlné p emíst ní pacienta ve dvou lidech.



Pacient m že být p emíst n, jak vleže, tak vsed , s minimálním fyzickým kontaktem. Podložka m že být umíst ěna také pod pacientem na k esle nebo židli. Nosnost podložky je do 150 kg.



Samarit Slide-up široký

Širší ást podložky v horní ásti t la pacienta. Spojené úchyty horní ásti podložky lze držet jednou rukou. Díky tomu m že být pacient lehce a bezpečn zvednut do sedu a následn p enesen.

Samarit Slide-Up, 50x100 cm
Art. No. 450-5010



Samarit Slide-Up wide, 100/50x100 cm
Art. No. 450-5110



Samarit Ambu-Slide 50 x 100 cm
Art. No. 450-6100

Samarit Glideboards

Glideboards a příslušenství



"The Biggest" Samarit Glideboard (102 cm)

zjednodušuje přesun pacienta za pomoci zdravotnického personálu ze stolu lůžka na kolečkové křeslo nebo na WC křeslo. Je vyroben z velmi odolného materiálu (HDPE), acidorezistentní, snadno omyvatelný a dezinfikovatelný. Speciální protiskluzové adhezivní (modré) části zajišťují uchytení k posteli, kolečkovému křeslu atd.

"The Great" Samarit Glideboard (80cm)

usnadňuje přesun pacienta z okraje postele do kolečkového křesla, WC křesla, do motorového vozidla atd. Materiál je stejný jako u The Biggest.

Sit-On Trousers (příslušenství)

se používá během přesunu pacienta, pokud není oblečen (například do WC křesla). Tato pomůcka chrání pokožku pacienta a je bezpečná na pomoc suchého zipu. Dva pevné úchyty umožňují personálu provést bezpečný přesun.

Curved-Glideboard (68 cm "banán")

se využívá k umístění lůžka do křesla, kolečkového křesla atd. Tento tvar podložky je patentován. Materiál je stejný jako u ostatních Glideboardů.

Selfglide-Glideboard (50 cm)

je primárně používán pacienty, kteří se mohou sami přemístit pomocí paží. Může být také použit pro přesun pacienta s minimální podporou personálu.

Tetraglide-Glideboard (63 cm)

byl vyvinut speciálně pro tetraplegiky, ale je všeobecně oblíbený i díky svému "rybímu ocasu". Vyznačuje se jednoduchostí přichycení k lůžku, kolečkovému křeslu atd. Materiál je stejný jako u ostatních Glideboardů.

Sit-On Sliding Towel (příslušenství)

umožňuje snadný přesun na Glideboardu bez oblečení. Obvykle je používán pacienty společně s Curved, Self-Glide a Tetraglide.

Glide-Belt


je pomůcka pro podporu pacienta během přesunu. Slouží k bezpečnému používání Glideboardu a prevenci poškození kůže pacienta.

Glide-Handle

je využíván u pacientů s nadváhou společně s "The Biggest" podložkou nebo pro usnadnění pohybu na lůžku.



"The Biggest"
Art. No. 470-0102

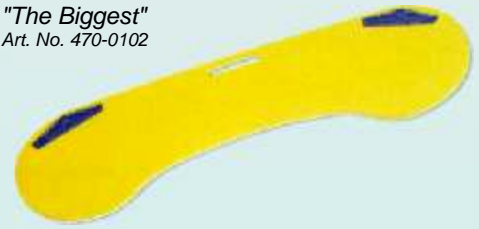

"The Great"
Art. No. 470-0080



Sit-On Trousers
Art. No. 470-0400




Curved Glideboard
"Banán"
Art. No. 470-0012



Selfglide Glideboard
Art. No. 470-0050



Tetraglide Glideboard
Art. No. 470-0863

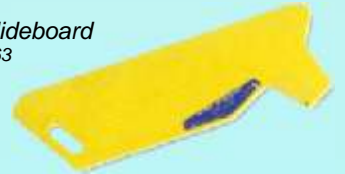

Sit-On Sliding Towel
Art. No. 470-0200



Glide Belt
Art. No. 470-2100 S-M
Art. No. 470.2200 L-XL



Glide Handle
Art. no. 470-2000



Samarit Pat-Sling

Pull-up Sling



Samarit Pat-Sling: usnadňuje vstávání ze židle i z okraje lůžka, pomáhá pacientovi si sednout nebo lehnout na lůžko, poskytuje oporu při sezení. Bílý protiskluzový materiál zajišťuje pacientovo bezpečí. Používání Pat-Sling šetří záda, fyzickou námahu personálu a je příjemné i pro pacienta.

Všestranný, bezpečný a užitečný pomocník v ošetrovatelské péči. Maximální nosnost 120 kg.



Samarit Pat-Sling
Art. No. 450.2050

Samarit Pull-Up

pro zvedání a přenesení pacienta



Zvedání z podlahy

Pull-Up je jediný z dostupných výrobků, který umožňuje zvedat pacienta z podlahy, pokud není dostupné jiné zařízení.

V rámci bezpečnosti personálu je doporučeno zvedat pacienta ve dvou lidech s rovnými zády z pozice pokrčených nohou.



Zvedání na lůžku

Bez velké námahy může být pacient snadno přenesen nebo zvednut ve dvou lidech. Bílá protiskluzová strana podložky zajišťuje bezpečí pacienta. Modrá spodní strana je hladká a snadno klouže po povrchu. Podložka je ze dvou stran opatřena úchyty. Maximální nosnost 150 kg.



Samarit Pull-Up
Art. No. 450.5100

Samarit CareGlide

pro polohování a přesun pacienta



Samarit CareGlide Mod. 1

Velikost: 70 x 72 cm

Využití: pro posazení na okraj postele, 90° rotace, menší pohyby, posazení na posteli

Art. No. 450.0070



Samarit CareGlide Mod. 2

Velikost: 100 x 80 cm

Využití: přesun pacienta zleva doprava, přesunutí horní části těla na stranu, otočení pacienta na bok

Art. No. 450.0100



Samarit CareGlide Mod. 3

Velikost: 130 x 100 cm

Využití: přesun pacienta zleva doprava, otočení pacienta na bok, umístění pacienta při výměně ložního prádla

Art. No. 450.0130



Samarit CareGlide Mod. 4

Velikost: 110 x 80 cm

Využití: nižší nebo vyšší posazení pacienta, přesun pacienta zleva doprava, transport pacienta z lůžka na kolečkách k eslu

Art. No. 450.1180



Samarit CareGlide Mod. 5

Velikost: 130 x 100 cm

Využití: nižší nebo vyšší posazení pacienta, přesun postel-postel ve dvou lidech, přesun imobilních pacientů

Art. No. 450.1310

Pro zjednodušený přesun dlouhodobě nemocných na rehabilitačních odděleních, v domovech s pečovatelskou službou atd.

CareGlide

- jednoduché použití
- klouzavý povrch s dlouhou životností
- možnost prát do 75° C
- omyvatelný
- mikroporózní materiál umožňuje průchod páry
- nedráždivý
- různé modely

Samarit Rollbord

p ekládací podložky



SAMARIT

Samarit Rollbord

- STANDARD
- JUNIOR
- ROLLMAT
- MINI-GYN
- SOFT-BED
- Sterilizovatelný
- Ambulan ní





Samarit Rollover

- EASY
- LONG-GLIDE



Samarit Transglide

- LARGE
- SMALL

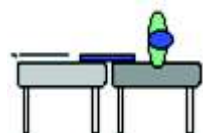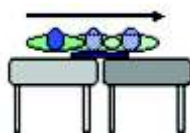

Medial spol. s r.o.
tel.: +420 296 328 328

Zákaznické centrum
fax: +420 296 328 320

Obchodní 110
E-mail: info@medial.cz

25170 Praha - estlice
http://www.medial.cz