



ROMET

NÁVOD K
OBSLUZE

MODEL # R310

Analogový elektronický Larynx

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Řeč lze snadno ovládat pouze jednou rukou.

NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Tlačítko zapnutí/vypnutí:
Tlačítko stisknete a po skončení mluvení jej uvolníte.

Výškové kolečko:

Otáčením tohoto kolečka nastavíte vyšší nebo nižší výšku tónu.

Po dosažení požadované úrovně sklonu není třeba provádět další nastavení.

Kolečko hlasitosti: Otáčením tohoto kolečka nastavíte hlasitost mluvení. Ikony + nebo - označují vyšší nebo nižší nastavení hlasitosti.

Cvičení

Přiložte si elektronický larynx Romet® ke krku a procvičte si hledání "příjemného bodu", abyste dosáhli nejlepšeho hlasového tónu.

POZNÁMKA: Toto místo může být na mnoha místech na krku nebo na straně úst; u každého člověka je jiné v závislosti na struktuře kůže a množství ozařování, kterému jste byli vystaveni. Dívejte se do zrcadla a opakujte jednoduché věty, abyste dosáhli zřetelnosti hlasu. Pokud je to možné, nahrajte si svůj hlas a přehrajte si ho, abyste slyšeli, jak zní. **Pravidelně cvičte!**

Nabíjení baterie



Součástí přístroje jsou dvě 9V lithium-iontové baterie. Chcete-li baterie nabít, jednoduše připojte dodaný kabel USB typu C do nabíjecího portu umístěného na baterii. Nabíjení lze přes jakýkoli standardní port USB nebo pomocí přiložené nabíjecího zařízení Romet.

Červené světlo LED = nabíjení.
Zelené světlo LED = plně nabit.

Vložení baterie

Odstraňte z přístroje koncovou část a vložte do ní 9V lithiovou baterii. Při vkládání baterie do zařízení dbejte na správnou polaritu. (+ a - konec) označených na baterii. Pro větší pohodlí jsou baterie Romet označeny červenou a modrou barvou aby odpovídala zásuvce pro pól baterie uvnitř zařízení. K elektrickému kontaktu dojde automaticky po zašroubování koncovky do zařízení.



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při recyklaci elektronických spotřebičů a baterií se řiďte místními požadavky.

Elektrolarynx Romet® lze provozovat i na běžné 9V alkalické baterie.

Manufactured & Distributed Worldwide by:

Fountain Head Marketing, Inc.

Dbá: Romet Electronic Larynx

14410 Saratoga Pass

San Antonio, TX 78254-1860

USA

Phone: 1.210.858.5189

Fax: 1.210.858.9608

Email: info@romet.us

Web: <http://www.romet.us>



European Union Representative
EuropeCer Alstr. 97
41063 Mönchengladbach, Germany

