

ŘEČ

Řeč lze snadno ovládat jednou rukou.

BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ.

Seřiditelná vrchní hlava. V případě potřeby otočením jemně doladíte zvuk. POZOR: Nadměrné seřizování hlavy bude mít za následek horší kvalitu tónu. Postupujte opatrně.

Vypínač: Chcete-li hovořit, stiskněte tlačítko, a jakmile skončíte, uvolněte je.

Ovladač výšky hlasu: (vlevo) Výšku hlasu snadno nastavíte otáčením kolečka. Po dosažení požadované výšky hlasu nejsou třeba žádné další úpravy.

Jemné doladění

Stiskem
zapnout

Stiskem
vypnout

Nastavení
výšky
hlasu

Nastavení
hlasitosti

Regulátor hlasitosti: (vpravo) Během hovoru můžete otáčet kolečkem regulátoru, a zvyšovat či snižovat tak hlasitost.

Zkouška: Přiložte elektrolarynx Romet® ke krku a pokuste se najít svůj „bod příjemného hlasu“, v němž dosáhnete nejlepšího tónu hlasu.

POZNÁMKA: Tento bod může být na různých místech krku nebo na boční straně úst. U každého je to jiné. Záleží na struktuře pokožky a na dávce záření, které jste byli vystaveni. Jasněho zvuku hlasu dosáhnete, budete-li před zrcadlem opakovat jednoduché věty. Pokud je to možné, svůj hlas si nahrajte a pak si poslechněte, jak zní. Mluvení pravidelně procvičujte!

VKLÁDÁNÍ BATERIE



Vkládání baterie: Odšroubujte uzávěr baterie a vložte 9V lithiovou baterii. Polarita baterie je zaměnitelná – póly + a – lze obrátit. Jakmile uzávěr našroubujete zpět na přístroj, dojde k elektrickému kontaktu.


Při prvním vkládání baterie může být nutné vyvinout jemný tlak. NETLAČTE NA BATERII SILOU.

NABÍJENÍ BATERIE



Nabíječka: Model R210 se dodává se dvěma 9V lithium-iontovými bateriemi. Baterie dodávané s přístrojem jsou nabity pouze přibližně z 80 %. Před použitím baterii nabijte na plnou kapacitu. Připojte nabíječku k síti o napětí 110V (pro napětí 220V budete potřebovat příslušný adaptér, který NENÍ součástí sady). Do nabíječky vložte jednu nebo dvě dobíjecí baterie. Červená kontrolka LED = vybitá baterie. Zelená kontrolka LED = plně nabitá.

UPOZORNĚNÍ: Lithium-iontové baterie nabíjejte pouze v nabíječce pro tento typ baterií. NIKDY tyto baterie nenabíjejte v žádné jiné nabíječce. Do nabíječky NIKDY nekládejte žádné jiné baterie, např. NiMH. **V elektrolarynxu Romet® lze použít i běžné 9V alkalické baterie.**

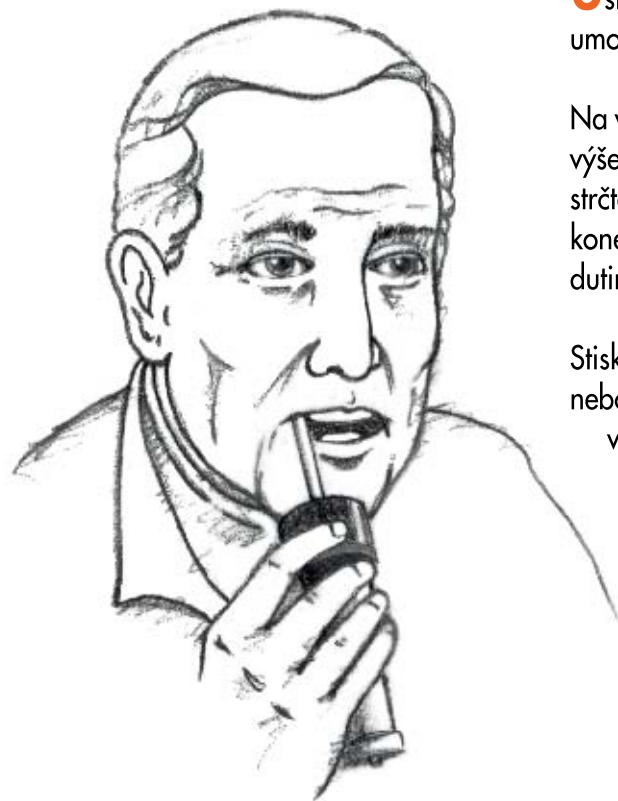

Ústní adaptér a trubičky dodávané s elektrolarynxem Romet® vám umožní začít mluvit v době, kdy se vám hrdlo teprve hojí po operaci.

Na vrchní část elektrolarynxu pevně umístěte gumový adaptér (viz obrázek výše). Do otvoru v adaptéru zasuněte trubičku. Trubičku do otvoru pevně zastrčte. Když mluvíte, musí trubička v otvoru adaptéru pevně držet. Umístěte konec trubičky do koutku úst a její špičku nasměrujte k vrchní části ústní dutiny.

Stiskněte vypínač na elektrolarynxu. Pomocí jednoduchých samohlásek nebo krátkých zvuků procvičujte řeč. Zkuste vyslovit několik jednoduchých vět.

Pokud je to možné, svou řeč pomalu namluvte do nahrávacího zařízení a nahrávku si poté poslechněte.

Průhledné trubičky dodávané s přístrojem jsou opatřeny špičkami, které brání tomu, aby se do nich při použití dostávaly částčky potravin.

Tuto špičku lze snadno odstranit, nebo můžete trubičku zkrátit nůžkami.

Poté co domluvíte, vypláchněte trubičku čistou studenou vodou. Nezapomeňte očistit vrchní část elektrolarynxu od zbytků slin či potravin.