


GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK

RYCHLÝ NÁVOD

①

Zřed'te vzorek stolice


25 µl čerstvého nebo zmrazeného vzorku dejte do zkumavky, obsahující 500 µl ředícího pufru (diluentu) a přidejte 1 kapku konjugátu. Důkladně promíchejte. U fixovaných vzorků stolice, přidejte 100 µl tohoto vzorku do zkumavky obsahující 400 µl ředícího pufru (diluentu) a 1 kapku konjugátu. Důkladně promíchejte.

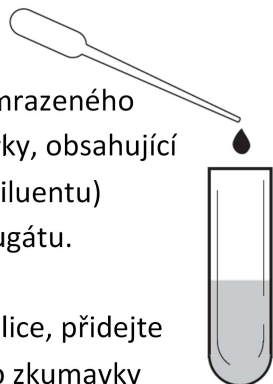

②

Přidejte vzorek


Přeneste pipetou 500µl směsi zředěného vzorku s konjugátem do jamky pro vzorek a inkubujte 15 minut při pokojové teplotě.

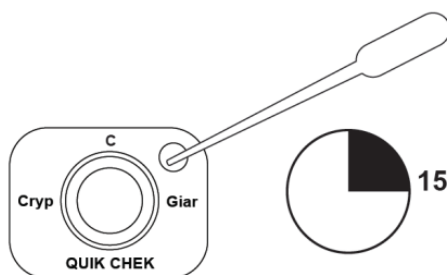

③

Promyjte membránu


Přidejte 300µl promývacího pufru do reakčního okna kazety a nechte plně vstřebat.

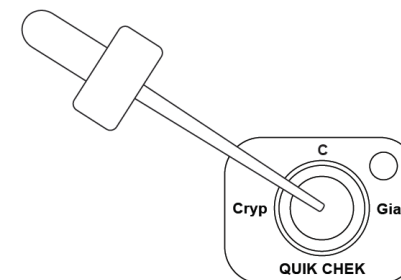

④


Přidejte substrát

Přidejte 2 kapky substrátu do reakčního okna kazety. Po deseti minutách odečtěte výsledek

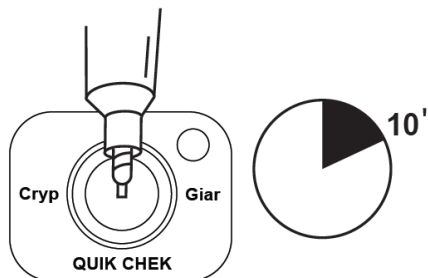


⑤


Interpretace výsledků

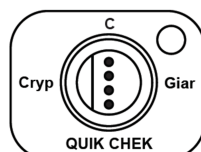


Pozitivní výsledek
Cryptosporidium

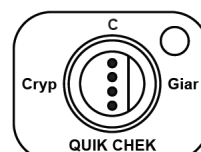

Pozitivní výsledek
Giardia

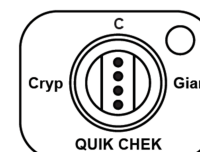

Pozitivní výsledek
Cryptosporidium a
Giardia

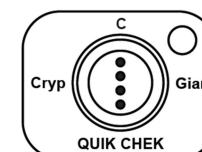

Negativní výsledek

Pozitivní výsledek může být odečten během 10-ti minut inkubace. Test nemůže být hodnocen jako negativní/chybný, pokud neuplynula 10-ti minutová inkubace.

Distribuce: ALERE, distribuce pro: ČR Medial spol. s r. o. Obchodní 110, 251 70 Čestlice, tel.: 602 626 448
Před použitím soupravy GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM důkladně přečtěte návod k použití.



Výrobce: Techlab  