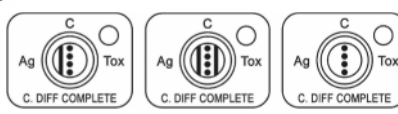
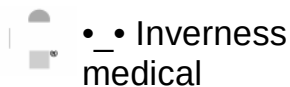


C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE™

NÁVOD K POUŽITÍ

- Ředění vzorku**
25 µL vzorku stolice přidejte do zkumavky obsahující 750 µL *Diluentu* a poté kápněte 1 kapku *Conjugátu*.
Důkladně zamíchejte.
 - Aplikace vzorku**
Přeneste 500 µL naředěného vzorku do jamky pro aplikaci vzorku *Sample Well*.
Inkubujte při pokojové teplotě 15 minut.
 - Promytí membrány**
Aplikujte 300 µL *Wash Buffer* do reakčního okna *Reaction Window*.
Promývací pufr nechte dokonale vsáknout.
 - Aplikace substrátu**
Aplikujte 2 kapky *Substrate* do reakčního okna *Reaction Window*.
Inkubujte při pokojové teplotě. Vyhodnoťte výsledek testu po 10 minutách po dokonalém vsáknutí *Substrate*.*
 - Vyhodnocení**

Pozitivní Antigen Pozitivní Antigen i Toxin Negativní
- Pokud se v zóně C (kontrola) neobjeví linie teček, je test nesprávný.
Čtete pozorně přiložený návod k interpretaci výsledků.

Dodává : MEDIAL spol. s r. o.



Tento návod neobsahuje kompletní informace k použití soupravy C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE™ test. Pro správné použití soupravy, čtete příbalový list.