


Rychlý průvodce použitím přístroje BLADDER VOLUME 6100

Poznámka: Pro zapnutí přístroje, který je v klidovém režimu zmáčkněte a přidržte libovolné tlačítko. Přístroj se po chvíli zapne.

1


Zvolte pohlaví pacienta

Pohlaví žena volte pouze u pacientek, které neprodělaly hysterektomii

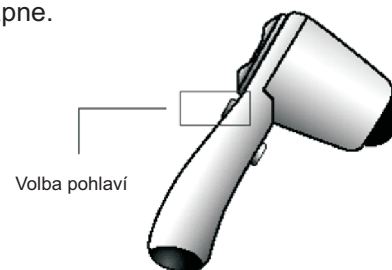


2


Aplikujte Sontac gelovou podložku

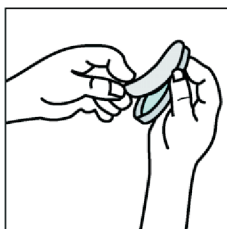

Otevřete balíček s podložkami

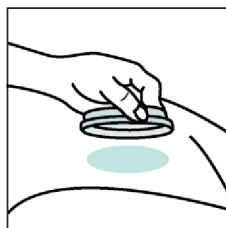

Položte gelovou podložku na břicho pacienta 3 cm nad stydkou sponu

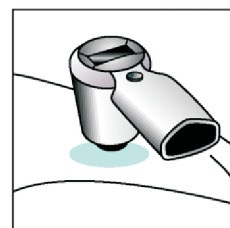


Přiložte hlavici skeneru na gelovou podložku

3

Zamířte na oblast moč. měchýře

Zamířte hlavici skeneru nepatrně dolů, směrem k pacientově kostrči

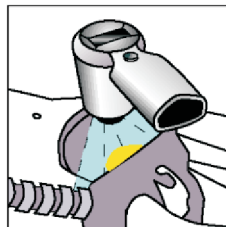

Zamířte na oblast moč. měchýře

4

Stiskněte tlačítko skenování

5

Ověřte měření




5A


Blikající šipka = opakujte měření



Objevila se blikající šipka

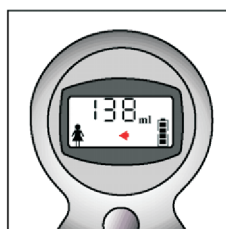

1) Šipka ukazuje doleva

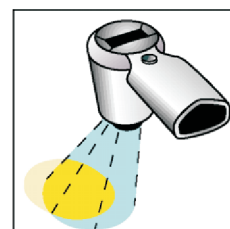


2) Zamířte doleva a měření opakujte

5B

Pokud šipky neblíkají nebo žádné nejsou = úspěšné měření, které není potřeba opakovat



Neblikající nebo žádné šipky

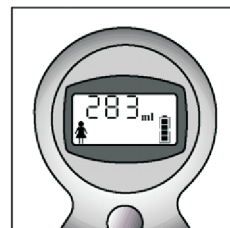

Rychlý průvodce použitím přístroje BLADDER VOLUME 6100

Poznámka: Pro zapnutí přístroje, který je v klidovém režimu zmáčkněte a přidržte libovolné tlačítko. Přístroj se po chvíli zapne.

1 Zmáčkněte tlačítko pohlaví, umístěné dole pod LCD displejem pro výběr nebo zrušení pohlaví. Pokud vyberete pohlaví žena, objeví se obrázek ženy na LCD displeji. Ženské pohlaví vyberte jen, když pacientka nepodstoupila hysterektomii. Pro všechny ostatní pacienty stiskněte tlačítko tak, aby na LCD displeji nebyl obrázek ženy.

2 Prohmatejte pacientovi oblast nad symfýzou. Umístěte Sontac gelovou podložku doprostřed na pacientovo břicho, přibližně 3 cm nad stydkou sponu.

3 Umístěte skener (zaobleným koncem) na Sontac gelovou podložku. Zaměřte ho směrem k předpokládanému umístění moč. měchýře. Pro většinu pacientů to znamená zaměření hlavičky mírně dolů směrem k pacientově kostrči.

4 Stiskněte a uvolněte skenovací tlačítko umístěné na spodní straně skeneru. V pravém horním rohu LCD displeje se objeví prohlížeč symbol.

5 Ověřte si, že skener byl řádně zaměřen ve směru blikající zaměřovací šipky.

5A Jestliže bliká zaměř. šipka dole na LCD displeji pod měřenou velikostí moč. měchýře, potřebujete znovu provést scan v indikovaném směru blikající šipky. Posuňte skener žadáním směrem. Představte si ultrazvukové vlny, které směřují ven od hlavičky skeneru směrem k pacientovu tělu. Jestliže blikající šipka směřuje doleva, zaměřte skener tak, že ultrazvukové vlny budou promítány na obrazovce dále doleva. Je nutné opakovat vyšetření, dokud se neobjeví neblíkající šipka, příp. na displeji nebude žádná šipka.

5B Zobrazený objem změřeného moč. měchýře je přesný, pokud na LCD obrazovce po prohlížení není žádná nebo je přítomna neblíkající šipka. Poznamenejte objem moč. měchýře. Skener nebude ukládat toto nepřesné měření. Můžete začít měření nové.

