

ŘEČ

Řeč lze snadno ovládat jednou rukou.

BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ.

Seřiditelná vrchní hlava. V případě potřeby otočením jemně doladíte zvuk. **POZOR:** Nadměrné seřizování hlavy bude mít za následek horší kvalitu tónu. Postupujte opatrně.

Vypínač: Chcete-li hovořit, stiskněte tlačítko, a jakmile skončíte, uvolněte je.

**Stiskem
zapnout
Stiskem
vypnout**

Jemné doladění



Zkouška: Přiložte elektrolarynx Romet® R100 ke krku a pokuste se najít svůj „bod příjemného hlasu“, v němž docílíte nejlepšího tónu hlasu.

POZNÁMKA: Tento bod může být na různých místech krku nebo na boční straně úst. U každého je to jiné. Záleží na struktuře pokožky a na dávce záření, které jste byli vystaveni. Jasného zvuku hlasu dosáhnete, budete-li před zrcadlem opakovat jednoduché věty. Pokud je to možné, svůj hlas si nahrajte a pak si poslechněte, jak zní. Mluvení pravidelně procvičujte!

VKLÁDÁNÍ BATERIE



Vkládání baterie: Odšroubujte uzávěr baterie a vložte 9V lithiovou baterii. Polarita baterie je zaměnitelná – póly + a - lze obrátit. Jakmile uzávěr našroubujete zpět na přístroj, dojde k elektrickému kontaktu.

POZNÁMKA: Model Romet R100 se dodává s jednou 9V alkalickou baterií (viz obrázek), kterou nelze znovu nabít. Model 110 Model se dodává s jednou dobíjecí 9V lithium-iontovou baterií. Model 120 se dodává se dvěma nabíjecími 9V lithium-iontovými bateriemi.

NABÍJENÍ BATERIE


(Pouze u MODELŮ 110 a 120.)



Nabíječka: Modely 110 a 120 se dodávají s jednou (model 110) nebo dvěma (model 120) 9V lithium-iontovými bateriemi. Baterie dodávané s přístrojem jsou nabity pouze přibližně z 80 %. Před použitím baterii nabijte na plnou kapacitu. Připojte nabíječku k síti o napětí 110V (pro napětí 220V

budete potřebovat příslušný adaptér, který NENÍ součástí sady). Do nabíječky vložte jednu nebo dvě dobíjecí baterie. Červená kontrolka LED = vybitá baterie. Zelená kontrolka LED = plně nabit.

UPOZORNĚNÍ: Lithium-iontové baterie nabíjejte pouze v nabíječce pro tento typ baterií. NIKDY tyto baterie nenabíjejte v žádné jiné nabíječce. Do nabíječky NIKDY nevkládejte žádné jiné baterie, např. NiMH. **V elektrolarynxu Romet® lze použít i běžné 9V alkalické baterie.**

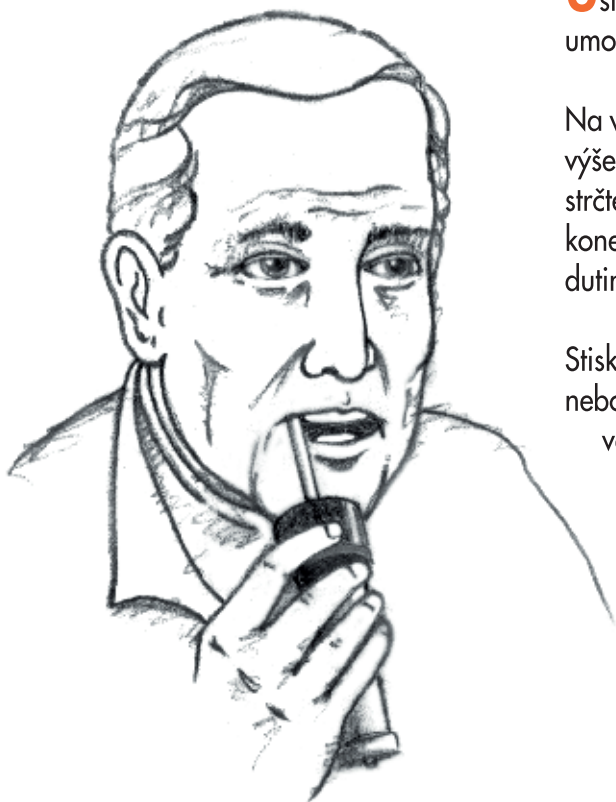

Ústní adaptér a trubičky dodávané s elektrolarynxem Romet[®] vám umožní začít mluvit v době, kdy se vám hrdlo teprve hojí po operaci.

Na vrchní část elektrolarynxu pevně umístěte gumový adaptér (viz obrázek výše). Do otvoru v adaptéru zasuňte trubičku. Trubičku do otvoru pevně zadržte. Když mluvíte, musí trubička v otvoru adaptéru pevně držet. Umístěte konec trubičky do koutku úst a její špičku nasměrujte k vrchní části ústní dutiny.

Stiskněte vypínač na elektrolarynxu. Pomocí jednoduchých samohlásek nebo krátkých zvuků procvičujte řeč. Zkuste vyslovit několik jednoduchých vět.

Pokud je to možné, svou řeč pomalu namluvte do nahrávacího zařízení a nahrávku si poté poslechněte.

Průhledné trubičky dodávané s přístrojem jsou opatřeny špičkami, které brání tomu, aby se do nich při použití dostávaly částičky potravin.

Tuto špičku lze snadno odstranit, nebo můžete trubičku zkrátit nůžkami.

Poté co domluvíte, vypláchněte trubičku čistou studenou vodou. Nezapomeňte očistit vrchní část elektrolarynxu od zbytků slin či potravin.